


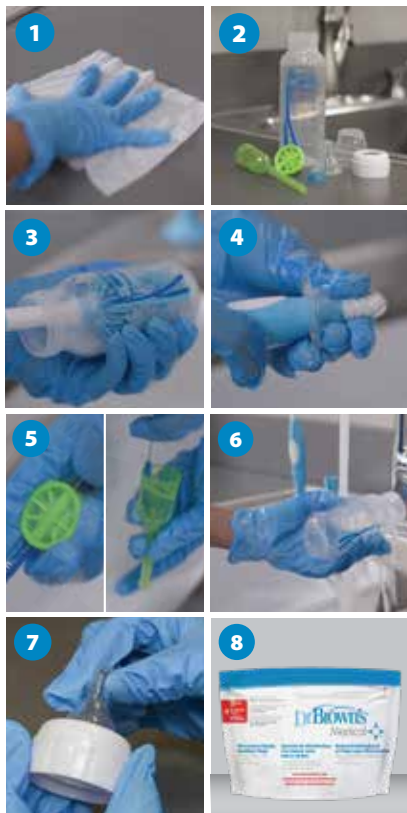

Instrucciones de limpieza

PRECAUCIÓN: No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar la tetina, ya que se romperá.

1. Al manipular el producto, tenga las manos y las superficies limpias (considere usar guantes de protección).
2. Antes del primer uso y después de cada uso, desarme y lave todas las piezas con agua y jabón.
3. Considere usar uno de los cepillos no metálicos Dr. Brown's, el cepillo para biberones no metálico o AccuBrush™, para eliminar los residuos de las piezas del biberón y la tetina.
4. Use la punta en forma de V de la parte inferior de cualquiera de los cepillos no metálicos para limpiar la tetina de forma segura.
5. Utilice un cepillo de limpieza metálico Dr. Brown's para limpiar a fondo el sistema de ventilación interna (es decir, el inserto y el depósito).
6. Enjuague bien y deje secar al aire.
7. Antes de cada uso, tire de la tetina en todas direcciones para asegurarse de que no haya roturas. Asegúrese de que el orificio de la tetina esté despejado. Reemplace la tetina si su integridad se ve comprometida.

Desinfección

ADVERTENCIA: No ponga en el microondas el cepillo de limpieza metálico.

8. Después de lavar, considere desinfectar antes del primer uso y cada 24 horas a partir de entonces. Use la bolsa esterilizadora al vapor para microondas Dr. Brown's (o un procedimiento equivalente). Siga las instrucciones impresas en la bolsa y respete la "ADVERTENCIA-NOTA DE SEGURIDAD" para evitar lesiones.

Los sistemas de biberones, tetinas y la válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) Dr. Brown's han sido probados para garantizar su funcionamiento hasta 30 ciclos de esterilización al vapor (autoclave). Carta de respaldo para la esterilización al vapor (autoclave) disponible bajo solicitud.

Si tiene alguna pregunta, preocupación o desea obtener más información sobre el armado, la limpieza y desinfección de los productos Dr. Brown's, envíe un correo electrónico a medinfo@drbrownsmmedical.com.